



ГП-20-СПУ, ГП-40-СПУ, ГП-80-СПУ стерилизаторы воздушные, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"



Предназначены для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей.

Применяются в лечебно-профилактических учреждениях, станциях переливания крови, стоматологических клиниках, аптеках, косметологических кабинетах, парикмахерских, лабораториях химической промышленности, пищевой, в других отраслях промышленности, бытовых учреждениях, лабораториях предприятий коммунальной сферы.

Имеют перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали.

Обеспечивают:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры режима;
- автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- автоматический запуск рабочей программы в заданное время (Ночной режим);
- задание скорости нагрева 2° С/мин., 5° С/мин., 7° С/мин;
- цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Обладают:

- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- малым весом;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе;
- защитой от перегрева;
- эргономичностью.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра		
	ГП-20-СПУ (арт. 3012)	ГП-40-СПУ (арт. 3014)	ГП-80-СПУ (арт. 3016)
Программы работы стерилизатора			
Стерилизация I: температура, °С	180	120	180
время, мин	60	45	60
Стерилизация II: температура, °С	160	180	160
время, мин	150	60	150
Дезинфекция: температура, °С	120	160	120
время, мин	45	150	45
Доп.режим: температура, °С	50...200		
время, мин	1...999		



Основные параметры			
Предельные отклонения температуры стерилизации дезинфекции и сушки от номинальных значений температур в загруженной стерилизационной камере, °С	±3		
Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более	+5		
Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более	55		
Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более	25	30	25
Усилие, необходимое для ручного открывания и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более	150		
Время непрерывной работы стерилизатора должно быть не менее, ч	16		
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,5	1,5	2,2
Объем рабочей камеры, дм ³	20	40	80
Размеры рабочей камеры, мм, не менее: длина x ширина x высота	333x215x277	410x275x360	340x510x460
Масса, кг, не более	27	35	52
Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более: длина x ширина x высота	625x475x416	720x550x490	620x830x600

Дополнительная комплектация:

- напольная подставка (по желанию заказчика).