

Динго-А-065 алкотестер



Персональный алкотестер **Динго А-065** предназначен для анализа паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Измеренное значение концентрации паров алкоголя в легких пересчитывается в концентрацию в крови и выводится на дисплей в единицах г/л (или промилле - грамм алкоголя в литре крови).

Питание прибора осуществляется с помощью 2 щелочных (алкалиновых) батареек АА.

Алкотестер очень удобен в применении, включается и выключается единственной кнопкой, расположенной на боковой панели.

Продувание производится в эллипсовидную воронку над дисплеем (без мундштука) с расстояния около 2 см непрерывно с умеренной силой в течение около 4 секунд. Правильный выдох сопровождается продолжительным звуковым сигналом, по окончании выдоха прозвучит двойной сигнал. При срыве теста из-за преждевременного прекращения или недостаточной силы выдоха на дисплее высвечивается «F».

Дисплей с подсветкой позволяет провести тестирование в темноте, а звуковые сигналы облегчают пользование прибором.

Технические характеристики

тип датчика	полупроводниковый
продувание	без мундштуков
индикация	3-х разрядный цифровой дисплей с подсветкой
диапазон показаний	0,00 - 4,00 промилле
время подготовки	до 30 секунд
время установки показаний	около 2 секунд
рабочая температура	от 0°до 40 °С
межкалибровочный интервал	300 тестов или раз в год
питание	2 батарейки АА
размеры	103x40x18 мм
число тестов без подзарядки	до 100 тестов
вес	90 г
гарантия	на прибор: 12 месяцев
производство	Корея

Стандартная комплектация:

- алкотестер,
- 2 батарейки АА,
- инструкция по эксплуатации.

Алкотестер Динго А-065 поставляется с заводской калибровкой, производящейся на специальном оборудовании. При интенсивном использовании прибора чувствительный к алкоголю датчик изнашивается, повышая погрешность измерений. Для восстановления точности необходимо время от времени проводить настройку алкотестеров в специализированном сервисном центре.

Периодичность технического обслуживания зависит, в основном, от интенсивности использования прибора. В среднем необходимо производить настройку или замену сенсора через каждые 300 тестов или при появлении надписи «CAL» или «E» на дисплее, означающей, что прибор нуждается в сервисе.