



## NARCOCHECK тест



Тест-мультипанель NARCOCHECK для одновременного выявления 5 видов наркотических в-в (марихуана, амфетамин, опиаты, метамфетамин, кокаин) непогружного типа в комплекте с пипеткой. Индивидуальная картонная упаковка. Инструкция. Тест в виде мультипанели для одновременного выявления 5-ти видов (марихуана, амфетамин, опиаты, метамфетамин, кокаин) наркотиков.

### **Описание прибора**

Подготовка исследуемых образцов: любая проба мочи человека, собранная в любое время, подходит для теста. Мочу можно собрать в любую чистую, сухую, пластиковую или стеклянную посуду.

### Проведение анализа:

1. Во время проведения тестирования тест-устройство и моча должны быть комнатной температуры (15-30°C).
2. Вынуть набор для проведения тестирования из пакетика, надорвав его в области метки, и разложить на ровной поверхности.
3. Держа пипетку вертикально, добавьте 3-4 капли мочи с образцом в лунку в зоне S.
4. Оценить результат в течении 10-20 минут. Не читать результаты более чем через 30 минут.

### Интерпретация результатов:

- **Отрицательный:** выявление двух параллельных линий розового цвета, указывает на то, что в анализируемом образце мочи наркотических веществ (или их метаболитов) нет или же их концентрация ниже порогового значения (300 нг/мл для опиатов/морфина/героина, 1000 нг/мл для амфетамина, 1000 нг/мл для метамфетамина, 300 нг/мл для кокаина, 50 нг/мл для марихуаны).
- **Положительный:** выявление в контрольной зоне одной линии розового цвета свидетельствует о положительном результате анализа, т.е. указывает на то, что в анализируемом образце мочи концентрация наркотических веществ.
- **Тест недействителен:** если в течение 10 минут полосы не выявляются или появляется только одна полоса в тестовой зоне без полосы в контрольной зоне, результат интерпретировать нельзя. Необходимо повторить тестирование с помощью нового теста.
- Обратите внимание на то, что цветная полоса очень слабой интенсивности в тестовой зоне указывает, что уровень наркотических веществ (или их метаболитов) в выборке мочи близок к пороговому уровню. Этот результат следует интерпретировать как отрицательный.

### **Комплект поставки**

#### Состав набора:

- Тест-панель непогружного типа, пипетка и пакетик с осушителем, упакованные в пакет.
- Листок-вкладыш с инструкцией по применению.